

ClearNote / + / Light / VGA mit Win8 / Win8.1

ClearNote, ClearNote Light und ClearNote VGA können mit Windows8/8.1 betrieben werden.

Hierfür ist die Installation des USB-Treibers STK1160Grabber wie nachfolgend beschrieben notwendig:

Windows 8/8.1

Erzwingen der Treibersignatur verhindern

1) Die "WIN"-Taste gemeinsam mit "C" drücken. (Oder die Maus auf die rechte untere Ecke bewegen, es öffnet sich eine Leiste.

2) Mit der Maus, auf "Einstellung" klicken

3) Rechts unten auf "PC-Einstellung ändern" klicken

4) WIN8: Auf der PC-Einstellungsseite auf "Allgemein" klicken
WIN8.1: "Aktualisierung und Wiederherstellung" und "Wiederherstellung" klicken

5) Bei Erweiterten Start, auf "Jetzt neu starten" klicken

6) Kurze Zeit warten

7) Bei Optionen auswählen - auf "Problembehandlung" klicken

8) Bei Problembehandlung - auf "Erweiterte Optionen" klicken

9) Bei Erweiterte Optionen - auf "Starteinstellung" klicken
Windows 8/8.1 startet neu und zeigt ein Menü an,

10) "Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren", Taste F7 drücken

11) Jetzt kann der nicht signierte Treiber über die Systemsteuerung installiert werden.